



ResMed

AirFit™ F30




La simplicité combinée
à une performance
remarquable.

Voici l'AirFit™ F30 de ResMed – notre masque facial à contact minime qui surpasse le masque facial ResPironics® DreamWear™ et Amara View™ de Philips pour les caractéristiques principales qui comptent pour vous – confort,¹⁻³ ajustement,^{2,3} étanchéité¹⁻³ et silence.⁴⁻⁶ De plus, il rend les commandes et la gestion de l'inventaire plus efficace pour votre entreprise en ayant le moins de pièces.*



ResMed.com/AirFitF30

Caractéristiques de l'AirFit F30

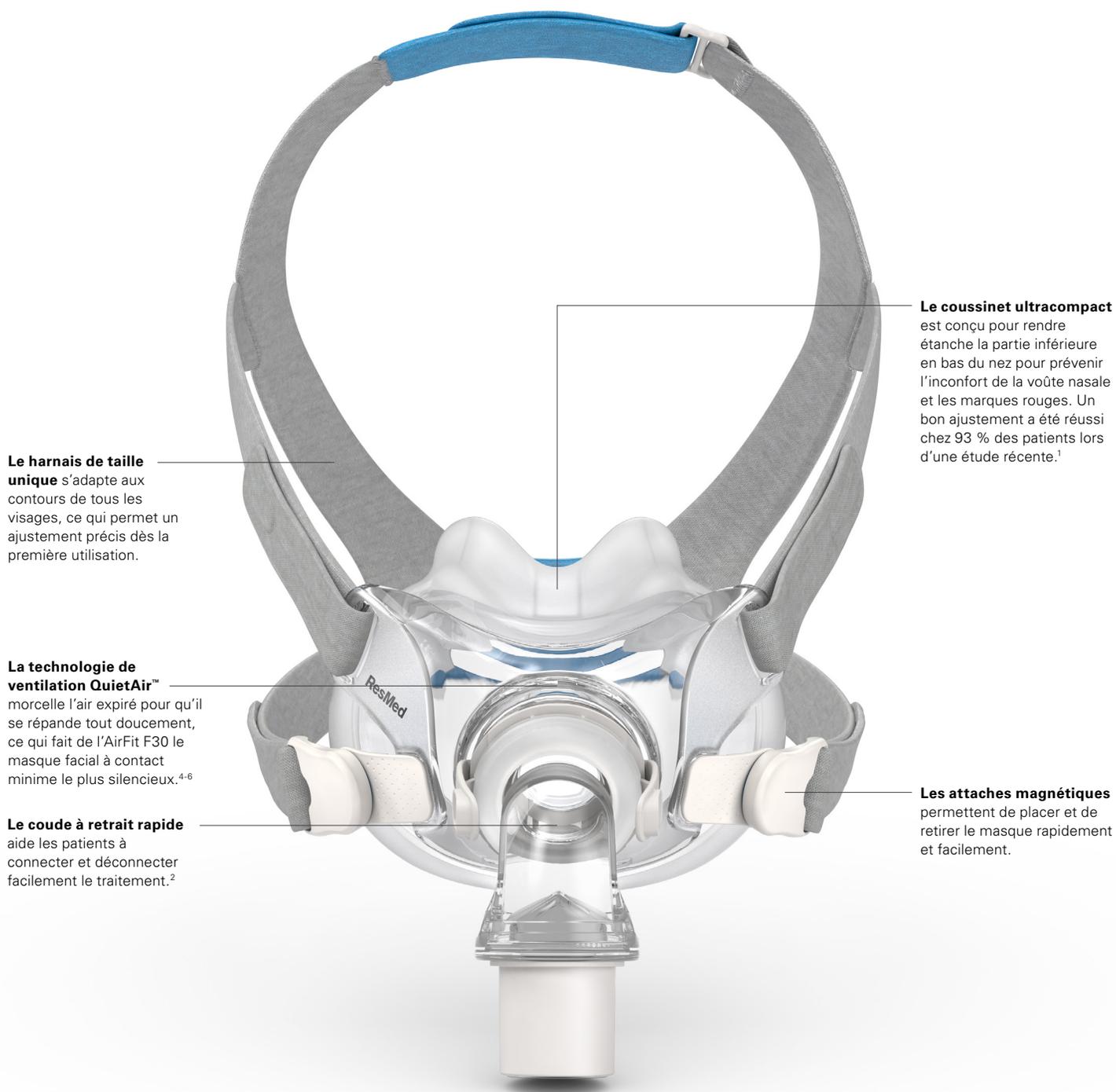

Le harnais de taille unique s'adapte aux contours de tous les visages, ce qui permet un ajustement précis dès la première utilisation.

La technologie de ventilation QuietAir™ morcelle l'air expiré pour qu'il se répande tout doucement, ce qui fait de l'AirFit F30 le masque facial à contact minime le plus silencieux.⁴⁻⁶

Le coude à retrait rapide aide les patients à connecter et déconnecter facilement le traitement.²


Le coussinet ultracompact est conçu pour rendre étanche la partie inférieure en bas du nez pour prévenir l'inconfort de la voûte nasale et les marques rouges. Un bon ajustement a été réussi chez 93 % des patients lors d'une étude récente.¹

Les attaches magnétiques permettent de placer et de retirer le masque rapidement et facilement.

Codes de produit de l'AirFit F30

Systèmes de masque complets (comprenant le contour et le harnais)	Coussinets compris	Code de produit
AirFit F30 : Petit	P	64100
AirFit F30 : Moyen	M	64101
Systèmes de contour (comprennent un contour, un coussinet et un coude)		
Système de contour de l'AirFit F30 : Petit	P	64155
Système de contour de l'AirFit F30 : Moyen	M	64156

Accessoires	Code de produit
Coussinet de l'AirFit F30 : Petit	64150
Coussinet de l'AirFit F30 : Moyen	64151
Harnais de l'AirFit F30 : Standard	64161

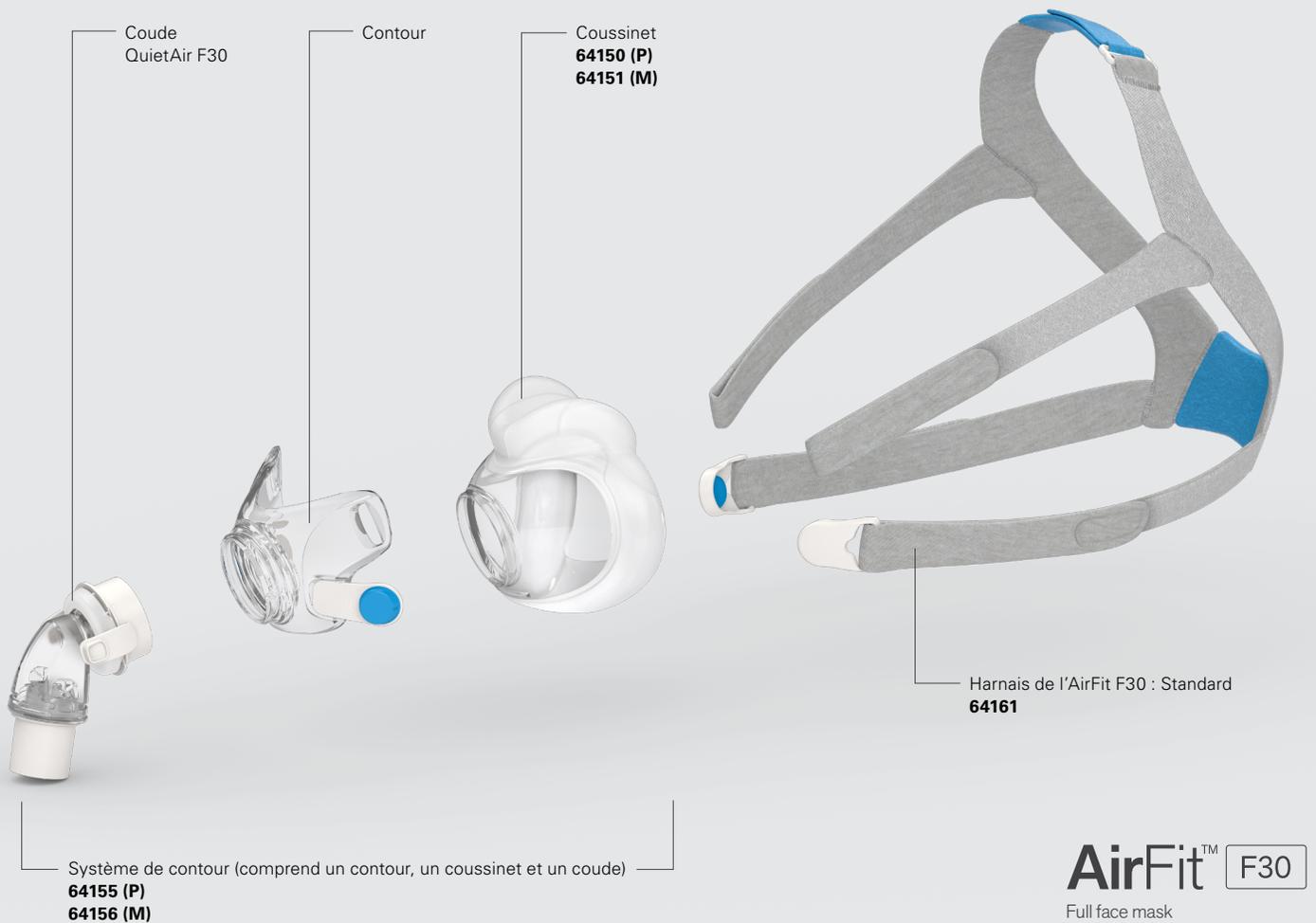

Guide d'ajustement de l'AirFit F30



- Placez le coussinet ultracompact sous votre nez et assurez-vous qu'il est confortablement positionné sur votre visage. En ayant le logo de ResMed sur le harnais placé vers le haut, tirez le harnais par-dessus votre tête.



- Placez les sangles inférieures du harnais sous vos oreilles et fixez les attaches magnétiques du harnais au contour.



- Détachez les bandes de fixation des sangles supérieures du harnais et tirez de façon égale. Répétez avec les sangles inférieures du harnais.



- Si le harnais est trop près de votre oreille, ajustez la sangle du harnais sur le dessus de la tête.



- Branchez la tubulure de votre appareil de PPC au coude.



- Fixez le coude au contour. Le masque est maintenant prêt à être utilisé.



Options supplémentaires

Pour les patients qui ont les cheveux longs, nous recommandons de faire sortir les cheveux derrière le harnais. S'ils sont attachés en queue de cheval, elle devrait être suffisamment haute pour émerger confortablement derrière le harnais.

Consultez le guide de l'utilisateur pour obtenir davantage d'instructions et des renseignements d'étiquetage complets, notamment les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions.

*Au moment de cette étude, l'AirFit F30 de ResMed contenait moins de pièces que le masque facial Respicronics DreamWear et Amara View de Philips.

1 Étude sur l'ajustement de l'AirFit F30 de ResMed menée auprès de 75 patients d'avril à mai 2018 dans plusieurs endroits aux É.-U. L'étude a évalué l'éventail d'ajustements et la stratégie de choix de la taille de l'AirFit F30, et a testé l'AirFit F30 de ResMed par rapport au Respicronics Amara View de Philips (les deux masques ont un contact minime, facial). 2 Étude clinique guidée sur l'AirFit F30 de ResMed menée auprès de 23 patients du 8 juin au 24 août 2018 en Australie. L'étude a testé l'AirFit F30 de ResMed par rapport au masque facial Respicronics DreamWear de Philips (les deux masques ont un contact minime, facial). 3 Étude clinique guidée sur l'AirFit F30 de ResMed menée auprès de 21 patients d'avril à mai 2018 en Australie. L'étude a testé l'AirFit F30 de ResMed par rapport au Respicronics Amara View de Philips. 4 ResMed Ltd. Guide de l'utilisateur de l'AirFit F30 de ResMed. Bella Vista, Australie; 2018. 5 Mode d'emploi du masque facial Respicronics DreamWear de Philips Koninklijke Philips N.V. Murrsville, PA; 2016. 6 Mode d'emploi du masque facial à contact minime Respicronics Amara View de Philips Koninklijke Philips N.V. Murrsville, PA; 2016. Distribué par ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 É.-U. 1 858 836-5000 ou 1 800 424-0737 (numéro sans frais). Visitez notre site Internet ResMed.com pour plus d'information sur nos bureaux dans le monde. AirCare et QuietAir sont des marques de commerce et/ou des marques déposées du groupe d'entreprises ResMed. Amara View, DreamWear et Philips Respicronics sont des marques de commerce de Koninklijke Philips N.V. déposées au É.-U. et dans d'autres pays. La fiche technique peut être modifiée sans préavis. Pour des informations sur les brevets et autres propriétés intellectuelles, visitez ResMed.com/ip. © 2018 ResMed. 10110902/1 2018-10